



THERMOCARE *Convenience*

Beheizte Liegefläche zum Aufsetzen auf
Arbeitsplatten und Schrankanlagen

THERMOCARE *Convenience*

Neugeborene brauchen eine Umgebung, die Wärme und Geborgenheit vermittelt. Vor allem Frühgeborene haben einen großen Bedarf an Zuwendung, Wärme und Schutz. Deshalb sollten Versorgungs-, Untersuchungs- und Behandlungsplätze so ausgestattet werden, dass sich die kleinen Patienten wohlfühlen. Mit der beheizten Liegefläche aus der bewährten Gerätefamilie THERMOCARE kommen wir diesem Ziel einen großen Schritt näher. Die weiche, warme Gelmatratze erinnert das Baby an den Hautkontakt mit den Eltern, vermittelt Behaglichkeit und wirkt entspannend.

Die Liegefläche kann als Kompaktmodul auf Arbeitsplatten und Schrankanlagen aufgesetzt oder in Wickel-

kombinationen integriert werden. Zusammen mit einem Wärmestrahler der Baureihe CERAMOTHERM® können nun auch an einem fest installierten Versorgungsplatz gleich gute Bedingungen geschaffen werden wie in einer mobilen Reanimationseinheit.

Die angenehme, konduktive Wärme der Gelmatratze erwärmt selbst unterkühlte Säuglinge schnell und effektiv. Die Temperatur wird in Stufen von 0,1 °C eingestellt, angezeigt und elektronisch überwacht. Alarmer warnen bei Über- und Untertemperatur, Systemfehler oder Netzausfall. Ein separater Überwachungskreis schaltet die Heizung im Fehlerfall ab.

Bestellinformation

THERMOCARE Convenience,
Beheizte Liegefläche mit Poly-Gelmatratze,
4 Gummifüßen und integrierter Ablage
Best. Nr. WY2011



Technische Daten

Maße	715 x 600 x 40 bzw. 100 mm (TxBxH)
Gewicht	12 kg
Betriebsspannung / Netzanschluss	230 V~ / 50 60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	160 W / 0,7 A
Temperatureinstellung (Sollwert), Standardbereich	35 °C bis 37 °C
Temperatureinstellung (Sollwert), erweiterter Bereich	30 °C bis 38,5 °C
Schaltsschritte der Temperatureinstellung	0,1 °C
Auflösung der Anzeigen	0,1 °C
Sollwertanzeige	30 °C bis 38,5 °C
Istwertanzeige	0 °C bis 50 °C
Restwärmeanzeige	Bis Abkühlung auf 30 °C, danach automatische Abschaltung
Sicherheitsabschaltung	Bei 40,5 °C
Schutzklasse	1
Typ Gesamtgerät	B
Typ Liegeflächenheizung	BF
Geräteklasse lt. MPG	Ila



Weyer GmbH

Herrenhöhe 4, D-51515 Kürten-Herweg
Tel.: (+49) 02207 9698-0
Fax.: (+49) 02207 4750
E-Mail: info@weyermed.com
www.weyermed.com

