



THERMOCARE *Vita*

Der Inkubator zur Wärme- und Intensivpflege von Säuglingen

THERMOCARE Vita

Der Inkubator zur Wärme- und Intensivpflege von Säuglingen

Die Frühgeburt ist der schwierigste Start in diese Welt und eine große Herausforderung für Ärzte, Pfleger und Eltern. Sie geben Tag für Tag ihr Bestes, um den kleinsten Patienten diesen Start zu erleichtern und Leben zu ermöglichen.

Der Inkubator Thermocare Vita hilft ihnen, dieses Ziel zu erreichen. Er verbindet die Stabilität eines geschlossenen Klimaraumes mit den guten Zugangs- und Kontaktmöglichkeiten der offenen Pflege.

Frühgeborene verbringen meist ihre ersten Lebensmonate im Inkubator. In dieser Zeit ist Ruhe ein wichtiger Faktor für deren weitere Entwicklung. Im Inkubator THERMOCARE Vita wird die Geräuschentwicklung durch eine optimale Luftführung und das geräuschfreie Mikrobefeuchtersystem erheblich reduziert.



Immer das richtige Klima

Luft- und Körpertemperatur, Feuchte und Sauerstoffkonzentration werden dem Bedarf des Säuglings entsprechend eingestellt und automatisch geregelt. Eine völlig neue Luftführungstechnik sorgt für eine gleichmäßige Warmhaltung des Patienten und minimiert die transepidermalen Wasserverluste.




Maximale Hygiene

Das Mikrobefeuchtersystem mit offener Verdunstungswanne arbeitet geräuschlos und kann komplett gereinigt und desinfiziert werden. Es verbleibt kein Restwasser im System, daher besteht keine Kontaminationsgefahr. Wasser wird über handelsübliche Sterilwasserflaschen oder Infusionsbeutel zugeführt, ein Vorratsbehälter ist nicht erforderlich. Somit entfällt ein Umfüllen und die hiermit verbundenen Risiken einer Kontamination werden vermieden.



Monitor / Bedienterminal

Innovative Technologie regelt und überwacht die Werte für Luft- und Patiententemperatur sowie für Feuchte und Sauerstoffkonzentration. Die eingestellten Parameter und Messwerte werden klar gegliedert angezeigt, mit einer grafischen Darstellung des Verlaufs der letzten drei Stunden. Alle Informationen können über die Trendfunktion für den Zeitraum einer Woche zurückverfolgt, verglichen und ausgewertet werden.

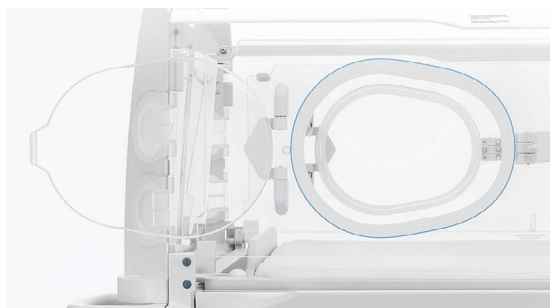

Ergonomische Gestaltung

Das Doppelwand-Scheibensystem hat vier große Schwenkfenster. Diese lassen sich schnell und einfach durch Druck auf den Entriegelungsmechanismus (auch mit desinfizierten Händen) öffnen. Auch ein Öffnen beider Durchgrifföffnungen ist durch ein zentrales Drücken möglich.



Direkter Patientenzugang

Für Schläuche und Kabel sind genügend Durchführungsmöglichkeiten vorhanden.

Zum schnellen und ungehinderten Patientenzugang ist die Inkubatorhaube abnehmbar und alle Scheiben können sehr leicht mit einer Hand abgeklappt werden.



Einfacher Ortswechsel

Stabile Doppel-Leichtlaufrollen garantieren einen sicheren Stand des Inkubators und ermöglichen ein leichtes Fahren. Mit Hilfe einer Rolle mit Richtungsfeststeller lässt er sich gut um Ecken und Einrichtungsgegenstände steuern. Vier Stoßabweiserrollen schützen das Gerät und die Umgebung vor möglichen Beschädigungen.



Verstellbare Liegefläche


Die Liegefläche lässt sich per Knopfdruck elektromotorisch sehr schnell in die notwendige Kopfhoch- oder Kopftieflage bringen. Der eingestellte Neigungswinkel wird sofort auf dem Monitor angezeigt.



Besondere Funktionen

Die Liegefläche kann für besondere Eingriffe komplett herausgezogen werden und bleibt dabei stabil und belastbar.

Zusätzlich kann der Inkubator mit einer integrierten Waage ausgestattet werden.

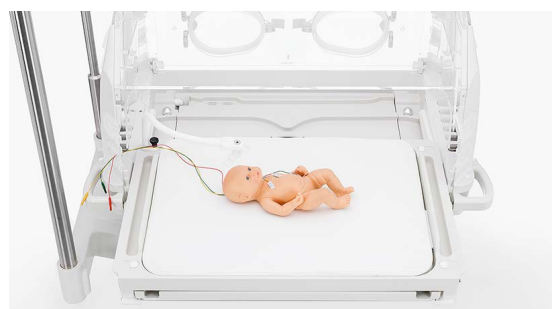

THERMOCARE Vita

Praktisch, sicher, zuverlässig



Einfaches Untersuchen

Zum Röntgen muss das Scheibensystem nicht geöffnet werden. Das Fach zum Einlegen der Röntgenkassette ist einfach von außen zugänglich. Das Mikroklima bleibt weiter erhalten.



Immer die richtige Wärme

Sowohl als geschlossener Inkubator, als auch im Offenpflege-modus bietet die Geräteausführung THERMOCARE Vita Vario gleichmäßige Wärme über dem gesamten Behandlungsbereich. Mit dem Standby-Wärmesystem steht sofort nach Öffnen der Haube Wärmeenergie zur Verfügung. Auch bei ausgezogener Liegefläche ist für ein optimales Wärmefeld gesorgt.



Die wichtigsten Dinge stets zur Hand

Bei der Pflege ist es wichtig, die notwendigen Utensilien stets griffbereit zu haben. Die Schubfächer des Inkubators lassen sich so öffnen, dass sie von allen Seiten und in jeder Situation zugänglich sind.



Umfangreiches Zubehör

Die Zubehörkomponenten aus dem THERMOCARE und dem VARIO THERM® Programm sind kompatibel und lassen sich an den Normschienen und Edelstahlholmen anbringen.



Weyer GmbH

Herrenhöhe 4, D-51515 Kürten-Herweg

Tel.: (+49) 02207 9698-0

Fax.: (+49) 02207 4750

E-Mail: info@weyermed.com

www.weyermed.com

